

Auvoin® FLU

nenäsuihke 20 ml

Auvoin® FLU nenäsuihke on säilöntäaineeton hypertoninen nenäsuihke, joka sisältää Golfvirrasta peräisin olevia merimineraaleja, ristosidottua hyaluronihappoa sekä glyseriiniä.

KUVAUS

Auvoin® FLU nenäsuihke on säilöntäaineeton, steriili, hypertoninen, pH:ltaan fysiologinen suolaliuos, joka on kehitetty kosteuttamaan ja suojaamaan nenän limakalvoa ehkäisemällä kuivuutta ja edistämällä nenäeritteiden juoksevuuutta ja poistumista.

Auvoin® FLU nenäsuihke hyödyntää täysin luontaista prosessia, osmoosia, joka auttaa poistamaan ylimääräistä nestettä nenän ärtyneestä limakalvosta. Lisäksi se ohentaa nenäontelossa olevaa limaa ja tekee siitä juoksevampaa. Golfvirran vedestä peräisin olevat merimineraalit auttavat puhdistamaan nenäonteloa poistamalla limaa ja lievittämällä limakalvon ärsytystä. Ristosidottu hyaluronihappo auttaa kosteuttamaan nenäonteloita ja tekee suolaliuoksesta miellyttävämpää käyttöä. Kasviperäinen glyseriini auttaa palauttamaan limakalvon oikean kosteustason.

Auvoin® FLU nenäsuihke ei sisällä säilöntäaineita eikä verisuonia supistavia aineita. **Auvoin® FLU nenäsuihke** ei sisällä parabeeneja.

KÄYTTÖKOHDE

Auvoin® FLU nenäsuihke -tuotetta suositellaan nuhan, poskiontelo-oireiden ja yleisen nenän tukkoisuuden ja ärsytyksen välittömään lievitykseen. Valmiste soveltuu nenän kuivan limakalvon kosteuttamiseen ja ärsytyksen hellävaraiseen lievittämiseen.

KÄYTTÖOHJEET

1. Niistä nenä ennen valmisteen käyttöä;
2. Poista suojakorkki (kuva 1);
3. Pitele pulloa yhden käden kolmella sormella (kuva 2): pitele sumutepumppua etu- ja keskisormen välissä ja tue pullon pohjaa peukalolla.
4. Ensimmäisellä käyttökerralla paina annostelulaitetta, kunnes sumutesuihku on tasainen;
5. Vie annostelulaitteen kärki sieraimen. Pidä pääsi ja pullo pystyasennossa, peukalo pullon pohjan alla ja kaksi sormeä pumpulla ja sumuta (kuva 3);
6. Toista toisen sieraimen kohdalla;
7. Anna valmisteen vaikuttaa muutaman minuutin

- ajan ja niistä sitten tarvittaessa nenä;
8. Huuhtelee käytön jälkeen annostelulaite vedellä, kuivaa se ja aseta suojakorkki takaisin paikoilleen (kuva 4).

Käytä kahdesti vuorokaudessa tai lääkärin ohjeiden mukaan.

Pullon sisältö on käytettävä 3 kuukauden kuluessa ensimmäisestä käyttökerrasta.

Vain henkilökohtaiseen käyttöön.

KOOSTUMUS Golfvirran vedestä peräisin olevat merimineraalit, kasviperäinen glyseriini, ristosidottua natriumhyaluronaattia sisältävä vesiliuos, natriumsitraatti, sitruunahappo, injektionesteisiin käytettävä vesi.

PAKKAUS Pakkaus sisältää yhden muovipullon ja annostelulaitteen. Muovipullon sisältö on steriiliä eikä sisällä säilöntäaineita.

VAROITUKSET

Vain nenään.

Vain yhdelle henkilölle.

Älä käytä tuotetta, jos pullon sinetti ei ole täysin kiinni ja/tai pullo ei ole ehjä.

Älä peukaloi tai vaurioita pulloa tai sen mekanismeja.

Älä käytä valmistetta, jos olet allerginen jollekin sen aineosalle.

Jos käytön aikana ilmenee haittavaikutuksia, lopeta valmisteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.

Jos haluat käyttää hengitettäviä lääkkeitä samanaikaisesti nenäsumutteen kanssa, kysy neuvoa lääkäriltä yhteensopivuuden arvioimiseksi.

Älä käytä pakkauksessa näkyvän viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Ei saa niellä.

Hävitä pakkaus asianmukaisesti käytön jälkeen.

Ei lasten ulottuville.

Säilytä kuivassa paikassa, suoralta kuumuudelta ja auringonvalolta suojattuna, ja 2 °C–30 °C lämpötilassa.

KESTOAIKA Älä käytä avaamatonta valmistetta pakkauksessa ja pullon etiketissä näkyvän viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.



COC Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15 - 40019
Sant'Agata Bolognese (BO)
Italia

Jakelija:


Oy Verman Ab
PL 164
01511 Vantaa



Lääkinnällinen laite



Viimeisin tarkistusajankohta: 02.01.02/2020

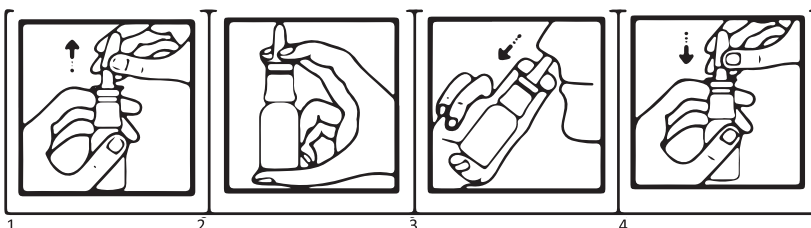

Auvoin® FLU

nässpray 20 ml

Auvoin® FLU nässpray är en hypertonisk nässpray utan konserveringsmedel, innehållande havsmineraler från Golfströmmen, korslänkad hyaluronsyra samt glycerin.

BESKRIVNING

Auvoin® FLU nässpray är en steril, hypertonisk saltlösning med fysiologiskt pH och utan konserveringsmedel, utvecklad för att återfukta och skydda näslemhinnan genom att förebygga torrhet och bidra till att nässekret blir tunnare och lättare att avlägsna.

Auvoin® FLU nässpray drar nytta av en helt naturlig process, osmos, som hjälper till att avlägsna överskottsvätska från den irriterade näslemhinnan. Dessutom tunnar det ut slemmet i näshålan och gör det mer lättflytande.

Havsmineraler från Golfströmmen bidrar till att rengöra näshålan genom att avlägsna slem och lindra irritation i slemhinnan.

Korslänkad hyaluronsyra bidrar till att återfukta näshålorna och gör saltlösningen behagligare att använda.

Vegetabiliskt glycerin bidrar till att återställa rätt fuktighetsnivå i slemhinnan.


Auvoin® FLU nässpray innehåller inga konserveringsmedel eller ämnen som orsakar sammandragning av blodkärl. **Auvoin® FLU nässpray** innehåller inga gaser som drivmedel.

ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅL

Auvoin® FLU nässpray rekommenderas för omedelbar lindring av snuva, bihålebesvär och allmän täppthet och irritation i näsan. Produkten är lämplig för återfuktning av torra näslemhinnor och skonsam lindring av irritation.

BRUKSANVISNING

1. Snyt näsan innan du använder produkten;
2. Ta bort skyddshatten (bild 1)
3. Håll flaskan i ena handen med tre av fingrarna (bild 2): håll pumpen mellan pek- och långfingret och stöd flaskans botten med tummen.
4. När du använder sprayen för första gången, tryck på pumpen tills sprayduschen är jämn;
5. För in sprayspetsen i ena näsborren. Håll huvudet och flaskan upprätt med tummen under flaskans botten och två fingrar på pumpen och spraya (bild 3);

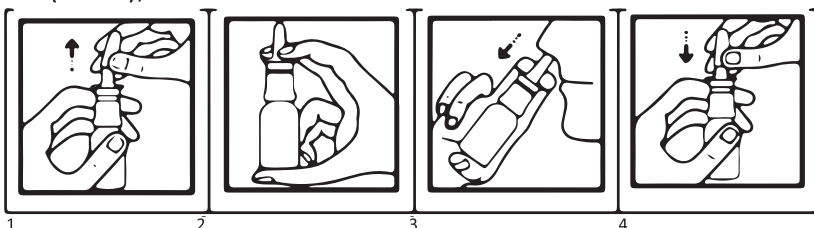

6. Upprepa i andra näsborren;
7. Låt produkten verka några minuter och snyt sedan näsan vid behov;
8. Skölj pumpen med vatten efter användning, torka av den och sätt tillbaka skyddshatten (bild 4).

Använd två gånger om dagen eller enligt läkarens anvisningar.

Flaskans innehåll måste användas inom 3 månader efter första användningen.

Endast för personligt bruk.

SAMMANSÄTTNING Havsmineraler från Golfströmmen, vegetabiliskt glycerin, vattenlösning innehållande korslänkad natriumhyaluronat, natriumcitrat, citronsyra, vatten för injektionsvätskor.

FÖRPACKNING Förpackningen innehåller 1 plastflaska med spraypump. Innehållet i flaskan är sterilt och innehåller inga konserveringsmedel.

VARNINGAR

Endast för användning i näsan.

Endast för en person.

Använd inte produkten om flaskan är ofullständig förseglad och/eller är skadad.

Manipulera inte och skada inte flaskan eller dess mekanismer.

Använd inte produkten om du är allergisk mot något innehållsämne i den.

Om det uppstår biverkningar under användningen, sluta använda produkten och kontakta läkare.

Om du vill använda inhalationsläkemedel samtidigt med nässprayen, rådfråga läkare för bedömning av eventuell oförenlighet.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Får inte sväljas.

Kassera förpackningen på korrekt sätt efter användning.

Förvaras utom räckhåll för barn.


Förvaras torrt i skydd från värmekällor och direkt solljus i en temperatur om 2 °C–30 °C.

HÅLLBARHET En öppnad produkt ska användas före utgångsdatum som anges på förpackningen och flaskans etikett.

COC Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15 - 40019
Sant'Agata Bolognese (BO)
Italien

Distributör:

Oy Verman Ab
PB 164
01511 Vanda

 Medicinteknisk produkt

Senaste översyn: 02.01 02/2020