

Lämpö / Kylmä Silmämaski



**Muotoutuu kasvojen
mukaan ja lievittää:**

- Väsyneitä silmiä
- Turvonneita silmiä
- Kuivia silmiä
- Päänsärkyä



KÄYTTÖTARKOITUS

LÄMPÖHOITO

MGD

BLEFARIITTI

LIPIDIPUUTOS

KUIVAT SILMÄT

VILUSTUMINEN

POSKIONTELOT

KYLMÄHOITO

ALLERGIA

PÄÄNSÄRKY

PUNAISET SILMÄT

VÄSYNEET SILMÄT

TURVONNEET SILMÄT

ESTEETTISEN
HOIDON JÄLKEEN

- CE- merkitty lääkinällinen laite
- Uudelleen käytettävä silmämaski vain ulkoiseen käyttöön
- Helmet sisältävät vettä, glyserolia ja natriumpolyakrylaattia
 - Maski ei sisällä BPA:ta, ftalaatteja tai lateksia
 - MediPearlin tuotteiden testaamiseen ei ole käytetty eläinkokeita



medilens nordic

Lisätietoja löydät sivulta www.medilensnordic.com

Silmämaski on suunniteltu pitämään lämpöä tai viileyttä noin 20 minuuttia.
Maskia ei saa käyttää herkälle tai ärtyneelle iholle, avohaavoille tai tunnottomalle iholle.
Ennen ensimmäistä käyttöä pese maski miedolla saippualla ja vedellä.
Maskin alle voi laittaa kasvopaperin.

LÄMPÖHOITO

Maskia suositellaan käytettäväksi 1-2 krt päivässä, noin 10 minuutin ajan.

- Lämmitä mikroaaltouunissa
 - 700W ~ 15 S
 - 1000W ~ 12 S
 - 1250W ~ 10 S

Tarkista aina maskin lämpötila ennen käyttöä, sen pitää olla lämmin mutta se ei saa polttaa.

Maskia ei saa lämmittää uunissa.
Vedessä lämmittäminen on sallittua, kunhan veden lämpötila ei ylitä 48 °C.

MGD oireisiin tehtävän lämpöhoidon jälkeinen silmäluomien hieronta optikon/silmälääkärin ohjeiden mukaan.

- Säilytä silmämaskia ilmatiiviissä muovipussissa tai pakastimessa/jääkaapissa
- Sallittua käyttää raskauden aikana.
- Lasten tulee käyttää maskia vain aikuisen valvonnassa.
- Maskia ei saa käyttää vauvoille.

On normaalia, että helmet voivat jonkin ajan kuluttua rikkoutua: silmämaski on silti edelleen käyttökelpoinen eikä menetä ominaisuuttaan. Silmämaskia ei saa korjata. Puhjennutta tai rikkiäistä silmämaskia ei saa käyttää, se tulee hävittää. Helmet tulee laittaa sekajäteastiaan ja muoviosa muovin kierrätykseen.




medilens nordic

Lisätietoja löydät sivulta www.medilensnordic.com

KYLMÄHOITO

- Jäädytä pakastimessa vähintään 2 tuntia ennen käyttöä.

- Puhdista silmämaski aina käytön jälkeen miedolla saippualla ja vedellä.

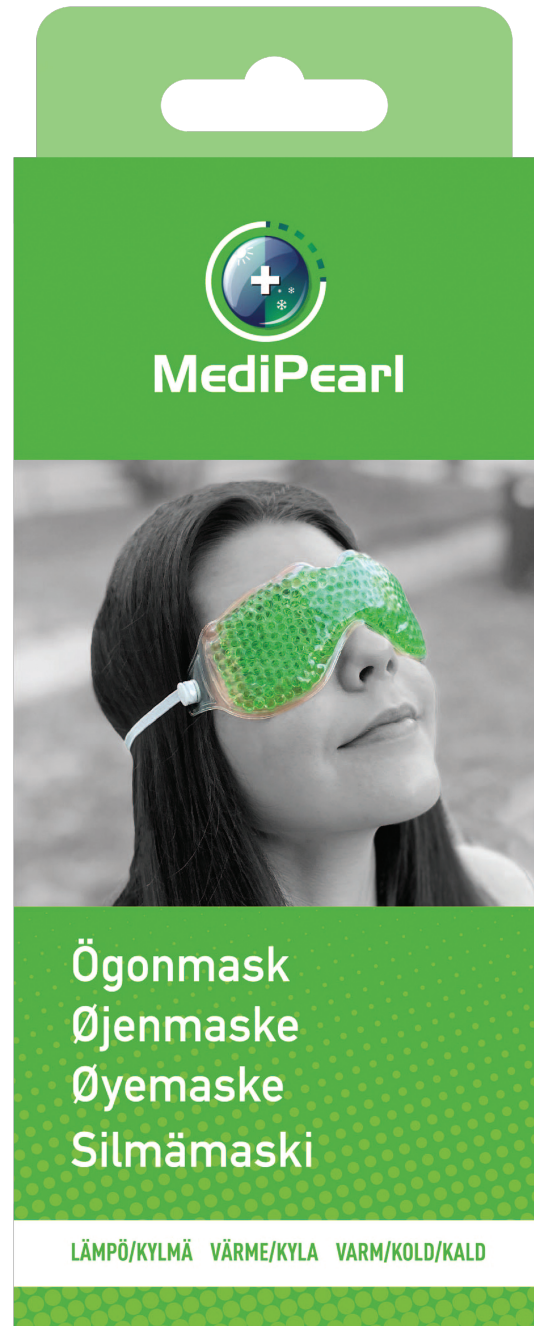

Ögonmask
Øjenmaske
Øyemaske
Silmämaski

LÄMPÖ/KYLMÄ VÄRME/KYLA VARM/KOLD/KALD