

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa valmisteen käytöstä. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen tai ota yhteys valmistajaan.

**BAUSCH + LOMB**

(FI)

# Oxyal<sup>®</sup> TRIPLE ACTION

0,24 % natriumhyaluronaatti, karbomeeri, glyseroli, lipidikomponentti, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi  
**Käyttötarkoitus: silmiä voiteleva aine**

## Mitä Oxyal Triple Action on?

**Oxyal Triple Action** on läpinäkymätöntä silmätippaliuosta, joka sisältää 0,24 % natriumhyaluronaatti, karbomeeri, glyseroli, lipidikomponentti, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi. Tämän pitkälle kehitetyn valmisteen siedettävyyden on erittäin hyvä, sillä valmiste ei sisällä säilöntäaineita eikä puskureita.

Avaamisen jälkeen valmistetta voi käyttää 6 kk ajan.

## Mihin tarkoitukseen Oxyal Triple Action -valmistetta käytetään?

**Oxyal Triple Action** on silmiä voiteleva aine, joka vakauttaa kyynelkalvon kaikkia kolmea kerrosta ja edistää näin silmän pinnan kosteutta kuivasilmäisyyden yhteydessä.

## Milloin Oxyal Triple Action -valmistetta käytetään?

**Oxyal Triple Action** on suunniteltu pysymään silmän pinnalla ja kostuttamaan tehokkaasti. Näin valmiste lievittää oireita välittömästi ja pitkäkestoisesti. Valmiste on ihanteellinen erilaisten kuivasilmäisyyden oireiden kuten silmien väsymisen, rasittumisen, rosokantunteen, kirvelyn ja/tai kyynelvuodon hoitoon.


## Kuinka usein ja kuinka pitkään Oxyal Triple Action -valmistetta käytetään?

Tiputa yksi tippa **Oxyal Triple Action** -valmistetta silmään tarvittaessa. Valmistetta voi käyttää joka päivä, niin usein kuin tarpeen.

## Miten Oxyal Triple Action -valmistetta käytetään?

### Huom. Ennen ensimmäistä käyttökertaa ja käyttötouon jälkeen:

Poista korkki ja suuntaa pullo alaspäin. Paina korkeintaan 20 painallusta, kunnes pullosta tulee tippa. Pullo on nyt käyttövalmis.

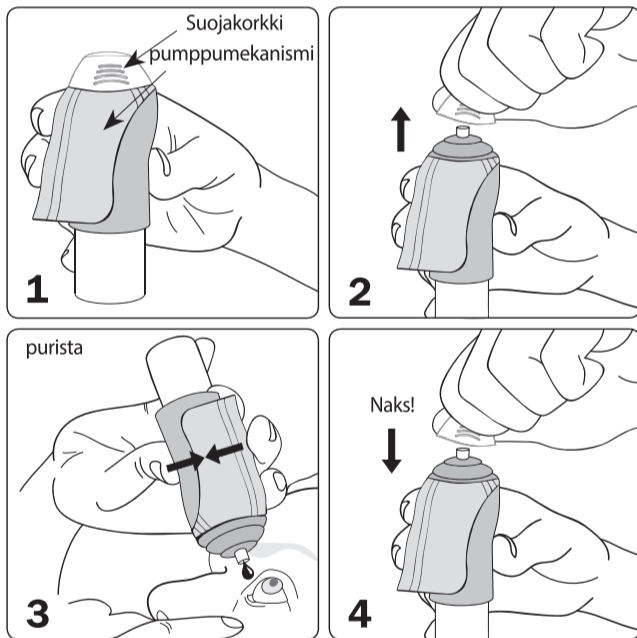

**1.** Pese kädet ennen **Oxyal Triple Action** -valmisteen käyttöä ja pitele pulloa kuvan mukaisesti.

**2.** Poista suojakorkki ennen kutakin käyttökertaa. Varo, ettei pullon kärki kosketa sormia eikä muita pintoja, jottei liuokseen joudu mikrobeja.

**3.** Käännä pullo ylösalaisin ja kallista päätä hiukan taaksepäin. Vedä alaluomea varovasti alaspäin yhdellä vapaan käden sormella, pitele pulloa pystysuorassa silmän yläpuolella ja purista pumppumeکانismia. Yksi tippa putoaa silmään.

Vältä koskettamasta silmän pintaa pullon kärjellä, jottei silmän pinta vaurioituisi.

Sulje silmä ja liikuttele sitä hitaasti, jotta tippa leviää silmän pinnalle mahdollisimman tasaisesti.

**4.** Jos pullon kärkeen on jäänyt tippoja, ravista ne heti käytön jälkeen pois ja pane suojakorkki paikoilleen kuivan kärjen päälle.

## Milloin Oxyal Triple Action -valmistetta ei pidä käyttää?

Älä käytä tätä valmistetta, jos olet yliherkkä jollekin sen aineosalle.

## Tärkeää tietoa Oxyal Triple Action -valmisteen käytöstä

- Paikallisia yliherkkyysoireita on ilmoitettu hyvin harvoin. Tällöin hoitoa ei pidä jatkaa.
- Valmiste voi aiheuttaa ohimenevää näön hämärtymistä annon jälkeen, mikä voi heikentää ajokykyä tai koneiden käyttökykyä.
- Älä kosketa silmän pintaa pullon kärjellä, jottei silmän pinta vaurioituisi eikä liuokseen joudu mikrobeja.
- Ravista pullon kärkeen mahdollisesti jääneet tipat pois käytön jälkeen.
- Valmisteen varmaton, käyttöohjeiden vastainen käyttö voi johtaa pullon putoamiseen kädestä ja aiheuttaa silmävaurioita.
- Ota piilolinssit pois ennen valmisteen käyttöä.
- Odota noin 15 minuuttia ennen kuin käytät jotakin toista silmävalmistetta tai laitat piilolinssit takaisin silmiin.
- Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Ei saa käyttää, jos pakkaus tai pullo on vaurioitunut.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa

## Miten Oxyal Triple Action -valmiste säilytetään?

Säilytä 1–25 °C lämpötilassa.

Dr. Gerhard Mann,  
Chem.-pharm. Fabrik GmgH  
Brunsbütteler Damm 165-173  
13581 Berlin  
Germany

STERILE A

Steriliserad med antiseptisk teknik  
Steriloitu aseptisin metodein  
Steriliseret ved bruk av aseptiske metoder  
Steriliseret med antiseptisk teknik



Kassera produkten efter 3 månader efter öppnandet.  
Terveysthuollon tarve on hävitettävä 3 kk kuluttua avaamisesta.  
Kast flasken 3 måneder etter første gangs åpning.  
Kassér produktet 3 måneder etter åpningen.

Distribueras av/Jälleenmyyjä/  
distribueret af/distribuert av:  
Bausch & Lomb Nordic AB  
Söder Mälarstrand 45  
104 65 Stockholm  
SWEDEN

+10°C +25°C

Temperaturintervall  
Lämpötilarajoitus  
Temperaturgrense  
Temperaturinterval



Se bruksanvisning  
Katso käyttöohjeita  
Se bruksanvisningen  
Se brugsvejledning

CE0483



Använd inte om förpackningen är skadad  
Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut  
Skal ikke brukes dersom pakningen er skadet  
Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.



Används före  
Käyt. viim.  
Brukes før  
Sidste anvendelsesdato

LOT

Batchnummer  
Eräkoodi  
Batchkode