

EPITHELIUM 26® -materiaalista valmistettu VAIVAISENLUU SUOJA

KÄYTTÖTARKOITUS

Ehkäisee liialliseen paineeseen ja hankaukseen liittyvää vaivaisenluun (hallux valgus) aiheuttamaa kipua.

VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää rikkoutuneella iholla. Jos sinulla on valtimotulehdus, diabetes, polyneuriitti, alaraajojen neuropatia tai haavaumia, kysy neuvoa lääkäriltä tai jalkaterapeutilta ja tarkkaile jalkaa suojan käytön aikana.

VAROITOMENPITEET

- Pestävä ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Suojaa käytetään paljaalla iholla. Se sopii käytettäväksi oikeassa tai vasemmassa jalassa.
- Liu'uta jalkaterä suojaan siten, että isovarvas asettuu putkenmuotoiseen osaan. Epithelium 26® -geeliä sisältävän osan pitää olla vaivaisenluun kohdalla.
- Suoja kestää parhaiten, kun sen päällä käytetään sukkaa tai sukkahousuja.

OMINAISUUDET

Jalkaterapeuttien patentoima Epithelium 26® on silikonigeeli, jonka painetta jakavat ominaisuudet muistuttavat ihonalaiskudoksen ominaisuuksia. Ohut Epithelium 26® -pehmike vaivaisenluun vieressä suojaa vaivaisenluuta ja lievittää tehokkaasti hankauksesta johtuvaa kipua aiheuttamatta kuitenkaan lisäpainetta. Nämä yksinkertaiset suojat eivät korjaa vaivaisenluuta.

ERGONOMIA

Suoja on pienikokoinen ja sopii käytettäväksi tavallisesti käyttämissäsi kengissä.

VINKKI

Jos isovarvasta pystyy yhä liikuttamaan, suosittelemme joustavan, päiväkäyttöön tarkoitetun EPITACT®-oikaisijan käyttämistä vaivaisenluun hoitoon. Se rajoittaa vaivaisenluun etenemistä, lievittää nivelkipua ja estää vaivaisenluun hankautumista.

HOITO-OHJEET

Konepesu 30°C:n lämpötilassa mukana toimitettavassa pesupussissa tai käsinpesu [hankaamatta]. Anna kuivua itsekseen. Ei saa silittää.

KOOSTUMUS: 61 % polyamidi-elastaanikangasta, 39 % silikonina.

Käytetyt materiaalit ovat läpäisseet kaikki ISO-standardissa 10993-1 määritellyt ihon kanssa kosketuksiin tulevia materiaaleja koskevat viranomaistestit. Jos tuote aiheuttaa ongelmia, lopeta sen käyttö välittömästi ja ilmoita asiasta MILLET Innovation -yhtiölle. Millet Innovation ei ole vastuussa siitä, jos tuotetta käytetään valmistajan suositusten vastaisesti. Viitekielenä on ranska. Alkuperäinen CE-merkintä: 201.



Konepestävä 30 °C:n lämpötilassa.



Ei saa silittää eikä höyryttää.



Ei kemiallista pesua.



Ei saa valkaista.



Ei saa rumpukuivata.



Ks. pakkaus.

Millet Innovation -yhtiön tutkimustyön tulos.



MILLET Innovation
ZA Champgrand 26270 Lorient/Drôme
RANSKA

MILLET
INNOVATION

www.epitact.fi

N19552-B
06/2021