

WOUND AWAY

Ihohalkeamat ja -haavaumat

WOUND AWAY -GEELI MUODOSTAA SUOJAAVAN KALVON
VEDENKESTÄVÄ

LIEVITTÄÄ NOPEASTI KIPUA JA NOPEUTTAA PARANEMISTA
KÄSIEN JA JALKOJEN PIENTEN IHOHALKEAMIEN JA -HAAVAUMIEN HOITOON

WOUND AWAY -geeli on tarkoitettu käsien ja jalkojen pienten halkeamien, rohtumien, haavaumien sekä pienten viiltohaavojen hoitoon.

OMINAISUUDET

Erikoiskoostumuksensa ansiosta WOUND AWAY -geeli muuttuu joustavaksi, läpinäkyväksi, suojaavaksi ja vedenkestäväksi kalvoksi, joka kuivuu nopeasti. Kalvo suojaa vaurioitunutta ärsyttäviltä aineilta, lievittää nopeasti kipua, auttaa haavoja paranemaan 5 päivässä ja ehkäisee niiden aukeamista uudelleen.

WOUND AWAY -geelin erikoiskoostumuksen on lisätty hoitavina ainesosina:

- E-vitamiinia, joka on erinomainen ihon uudistumista edistävä antioksidantti.
- Risiiniöljyä, joka pehmentää suojakerrosta ja tekee siitä joustavamman.

Soveltuu myös pienten diabeettisten jalka haavojen hoitoon, koska vasta-aiheita ei ole.

DERMATOLOGISESTI TESTATTU

KÄYTTÖOHJEET

- Puhdista ja kuivaa ihovauriokohta, kunnes verenvuoto lakkaa
- Levitä tuotetta iholle levityslastalla siten, että käsiteltävä kohta peittyy kokonaan
- Anna kuivua muutaman sekunnin ajan
- Toista toimenpide muutaman kerran päivässä, kunnes vauriokohta on kokonaan parantunut
- Kalvo voidaan poistaa levittämällä olemassa olevan kalvon päälle pisara tuotetta ja pyyhkimällä sitä liinalla
- Sulje pullo huolellisesti käytön jälkeen
- Avaamisen jälkeen tuote on käytettävä 6 kuukauden kuluessa

VAROITUKSET

- Ei sovelly alle 6-vuotiaille lapsille.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Soveltuu pienten paikallisten ihovaurioiden hoitoon.
- Tuotteen levittämisen jälkeen iholla saattaa tuntua kirvelyä, joka häviää muutaman sekunnin kuluttua.
- Jos iho alkaa punoittaa, tuotteen käyttö on lopetettava ja on otettava yhteys lääkäriin.
- Tuotetta ei saa niellä.
- Tuotetta ei saa käyttää pakkaukseen merkityn vanhenemispäivämäärän jälkeen.
- Tuotetta ei saa käyttää, jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut.
- Helposti syttyvä.
- Ärsyttää silmiä.

SÄILYTYS:

Säilytettävä viileässä, kuivassa paikassa, erossa lämmönlähteistä.

VASTAAIHEET JA SIVUVAIKUTUKSET

Ei saa levittää seuraaviin kohteisiin:

- Vuotavat haavat.
- Infektoituneet haavat.
- Palovammat.
- Limakalvot (huulet, peräaukko).
- Rinnat.
- Silmien ympärirytket.
- Älä käytä tuotetta, jos olet herkkä jollekin sen ainesosalalle.

KOOSTUMUS

ALCOHOL DENAT., CASTOR OIL, ETHYL ACETATE, HYDROXYPROPYL CELLULOSE, ISOPROPYL ALCOHOL, NITROCELLULOSE, TOCOPHERYL ACETATE.

PAKKAUS

WOUND AWAY -geeli
Pullo 7 ml ja levityslasta.
80 annosta
Turvakorkki

Terveydenhuollon laite  0425

Rev 00.0-SAB00 toukokuu 2019



Pasquali S.r.l.
V.le Belfiore 41
50144 Firenze – ITALY

Markkinoija:
Sabora Pharma Oy
PL 20, 03601 Karkkila
Suomi

SELITE



Tuotetta ei saa heittää luontoon.



Suojattava auringonvalolta.



Lue pakkausseloste huolellisesti!



Lue käyttöohjeet.



Älä käytä jos pakkaus on rikkiäinen.


SKIN CRACKS
HANDS - FEET

WOUND AWAY

Hudsprickor och fissurer

WOUND AWAY, BILDAR EN SKYDDANDE FILM MOT YTTRE PÅVERKAN

VATTENRESISTENT

LINDRAR SNABBT SMÄRTA OCH UNDERLÄTTAR SÅRLÄKNING

FÖR SMÅ FISSURER OCH HUDSPRICKOR PÅ HÄNDER OCH FÖTTER

WOUND AWAY används för att behandla små fissurer, narig hud, sprickor på händer och fötter och små skärsår.

EGENSKAPER

Tack vare den speciella teknologin bildar WOUND AWAY, efter appliceringen en transparent, skyddande, vattenfast, elastisk film som snabbt torkar. Filmen skyddar fissuren från yttre påverkan, lindrar snabbt smärta, underlättar läkningen av hudsprickor inom fem dagar och förhindrar att såret går upp.

WOUND AWAY innehåller en speciell sammansättning som är berikad med:

- E-vitamin, en enastående antioxidant som främjar hudens återuppbyggnad
- Castorolja är ett utmärkt uppmjukande och elasticerande medel för det skyddande hudlagret.

Då det inte finns några kontraindikationer kan produkten även användas av diabetiker för behandling av små fissurer på fötter.

DERMATOLOGISKT TESTAD

ANVÄNDNING

- Rengör och torka såret/sprickan tills det slutar blöda.
- Applicera produkten med den tillhörande applikatorn tills såret/sprickan är täckt och skyddad.
- Låt torka några sekunder
- Upprepa appliceringen flera gånger dagligen tills såret är helt läkt.
- Filmen kan tas bort genom att en extra droppe av produkten appliceras på den befintliga filmen. Torka av med en duk.
- Förslut flaskan ordentligt efteranvändning.
- Använd inte flaskan längre än 6 månader efter öppnandet.

VARNINGAR

- Används inte till barn under 6 år.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Använd för små lokalt förekommande sår
- Efter applicering av produkten kan en kortvarig, lindrig sveda uppstå som försvinner efter några sekunder.
- Om rodnad uppstår, ska behandlingen avslutas och läkare rådfrågas.
- Får inter förtäras.
- Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.
- Använd inte om förpackningen redan har öppnats eller är skadad.
- Mycket brandfarligt.
- Irriterande för ögonen.

FÖRVARING:

Förvaras svalt och torrt, skyddat från ljus och värmekällor.

KONTRAIKATIONER OCH BIVERKNINGAR

Applicera inte på:

- Blödande sår
- Infekterade sår
- Brännskador
- Slemhinna (läppar, anus)
- Bröst
- Huden runt ögonen.
- Använd inte om du är känslig för någon av ingredienserna.

INNEHÅLLSÄMMEN

ALCOHOL DENAT., CASTOR OIL, ETHYL ACETATE, HYDROXYPROPYL CELLULOSE, ISOPROPYL ALCOHOL, NITROCELLULOSE, TOCOPHERYL ACETATE.

FÖRPACKNING

WOUND AWAY

7 ml flaska med applikator.

80 doser

Skyddslock

Medicinteknisk product

CE 0425

Rev 00.0-SAB00 toukokuu 2019



Pasquali S.r.l.
V.le Belfiore 41
50144 Firenze – ITALY

Marknadsförs av:
Sabora Pharma Oy
PB 20, 03601 Högfors
Finland

LEGEND



Släng inte produkten i naturen



Utsätt inte produkten för solljus



Varning! Läs noggrant igenom varningarna



Läs anvisningarna före användning



Använd inte om paketet är trasigt

Dermovitamina
SKIN CRACKS
HANDS - FEET