

**KOSTEUTTAVAT  
DEKSPANTENOLI 2 %  
SILMÄTIPAT**

15 ml ja 20 x 0,35 ml

YA dekspantenoli silmätipat auttavat suojaamaan silmiä kuivumiselta sekä lievittävät silmien väsymystä ja ärsytystä. Muutama tippa silmiin annosteltuna lievittää vaivaa tai poistaa sen kokonaan.

YA dekspantenoli silmätipat on steriili, viskoosi ja kirkas neste, joka kosteuttaa ja ravitsee rasittuneita silmiä.

Dekspantenolivitamiiniyhdistelmä vahvistaa ja edistää sarveiskalvon omaa uudistumiskykyä ja HPC-ainesosa ylläpitää silmän omaa suojakalvoa. Ei sisällä eläinperäisiä ainesosia. Sopii myös käytettäväksi kaikenlaisen piilolinssien kanssa. Avaamattoman pullon viimeinen käyttöpäivä: katso merkintä kotelon sekä pullon pohjassa. Käytä avattu pullo kahden kuukauden kuluessa.

**ANNOSTUS:** 1–2 tippaa tai yksi ampulli 2–3 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan molempiin silmiin.

**KOOSTUMUS:** aktiivinen ainesosa: dexpanthenol 2 %, HPC 0,5 %, säilöntäaine: polyheksanidi 0,0001 %. Kerta-annospullit eivät sisällä säilöntäaineita.

**KÄYTTÖTARKOITUS:** Silmien kirvelyn tai poltteen tunteen tai punaisten tai väsyneiden silmien hoitoon. Näiden oireiden taustalla voi olla erilaisia tekijöitä, kuten:

- Piilolinssien aiheuttama ärsytys
- Rungas näyttöpäätetyöskentely tai TV:n katselu
- Ilmastointi, tuuli, ilman pienhiukkaset, uima-altaan vesi jne.

**KÄYTTÖOHJEET:** Voit annostella YA dekspantenoli silmätipat silmiin kahdella eri tavalla: suoraan silmiin tai piilolinssien avulla.

**A: Suoraan silmiin:**

- Mikäli käytät piilolinssijä voit antaa linssien olla silmissä.
- Vedä etusormella alaluomea kevyesti alaspäin.
- Tuo pullo tai ampulli toisella kädellä lähelle alaluomea, mutta varmista, ettei pullon tai ampullin kärki kosketa silmää.
- Tipauta 1–2 tippaa silmään ja räpäytä silmää 2–3 kertaa, jotta liuos leviää tasaisesti silmään.

**B: Piilolinssien avulla:**

- Pidä linssiä keskisormen kärjen päällä.
- Tipauta 1–2 tippaa linssille ja laita linssi silmään.
- Räpäytä silmää 2–3 kertaa.

**TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET:**

Älä käytä samaan aikaan silmälääkkeiden kanssa, jollei lääkäri toisin määrää. Älä käytä, jos sinulla on silmätulehdus. Älä käytä YA dekspantenoli silmätippoja, jos sinulla on todettu yliherkkyys jollekin tuotteen ainesosalle.

**VAROITUKSET:**

- Ampullit ovat kertakäyttöisiä.
- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
- Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Säilytä 4–25 °C lämpötilassa.
- Ota yhteys piilolinssiasiantuntijaasi, jos vaiva tai silmien ärtyminen jatkuu.
- Käytä avattu pullo kahden kuukauden kuluessa. Hävitä jäljelle jäänyt neste.
- Sulje pullo käytön jälkeen.

Käytettävä viimeistään ja eränumero: katso pullon ja kotelon pohja.

**Valmistaja:** Melleon Pharma B.V., 4817 ZH 7384 Breda, Alankomaat

**Markkinoija:** Yliopiston Apteekki, PL17, 00381 Helsinki, www.ya.fi, 0300 20200.

YA

Painos 9-2015 03REF0928

CE M90

STERILE/A

**FUKTANDE  
DEXPANTHENOL 2 %  
ÖGONDROPPAR**  
15 ml och 20 x 0,35 ml

YA dexpanthenol ögondroppar hjälper att skydda ögonen mot torrhet och lindrar ögonens trötthet och irritation. Genom att dosera några droppar i ögat lindras eller försvinner besvären.

YA dexpanthenol ögondroppar är en steril, viskös och klar lösning som återfuktar ansträngda ögon.

Dexpanthenol-vitaminkomplex främjar och stöder hornhinnans förmåga att förnyas och HPC bevarar ögats skyddshinna, vilket gör att ögat är bättre skyddat. Innehåller ej animaliska beståndsdelar. Lämpar sig med alla typer av kontaktlinser. Sista användningsdag för öppnad produkt: se märkning på botten av lådan samt på botten av flaskan. Använd öppnad flaska inom två månader.

**DOSERING:**

1-2 droppar eller en ampull 2-3 gånger om dagen eller vid behov i vardera ögat.

**SAMMANSÄTTNING:** aktiv beståndsdel: dexpanthenol 2 %, HPC 0,5 %, konserveringsmedel: polyhexanid 0,0001 %.

**TILLÄMPNING:** För behandling av stickande eller svidande känsla i ögonen eller röda eller trötta ögon. Dessa symptom kan bero på olika faktorer, såsom:

- Irritation av kontaktlinser
- Intensivt skärm eller tv-tittande
- Luftkonditionering, blåst, luftföroreningar, simbassängsvatten o.s.v.

**BRUKSANVISNING:** Du kan dosera YA dexpanthenol ögondropparna i ögonen på två olika sätt: direkt i ögonen eller med hjälp av kontaktlinser.

**A: Direkt i ögonen:**

- Om du bär kontaktlinser kan du låta dem vara kvar i ögonen.
- Placera ditt pekfinger på undre ögonlocket och dra ögonlocket lite neråt.
- Med din andra hand kan du nu föra flaskan eller ampullen närmare ditt undre ögonlock, men se till att dess spets inte kommer i kontakt med dina ögon.
- Droppa 1-2 droppar i ögat och blinka 2-3 gånger, så att lösningen kan breda ut sig jämnt över ögat.

**B: Med hjälp av kontaktlins:**

- Placera linsen på ditt långfinger.
- Droppa 1-2 droppar på linsen och lägg linsen i ögat.
- Blinka 2-3 gånger.

**SÄKERHETSFORESKRIFTER:** Använd inte tillsammans med andra ögonmediciner, ifall inte din läkare ordinerar något annat. Använd inte om du har en ögoninfektion. Använd ej YA dexpanthenol ögondroppar om du är överkänslig mot någon av produktens beståndsdelar.

**VARNINGAR:**

- Ampullerna är för engångsbruk.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Använd inte efter sista användningsdag.
- Förvara flaskan i 4-25 °C.
- Kontakta din kontaktlinseexpert om besväret eller ögonirritationen fortsätter.
- Använd öppnad flaska inom två månader. Kassera återstoden.
- Stäng flaskan direkt efter återvändning.

Använd senast och satsnr: se botten av flaskan och förpackningens undersida.

**Tillverkare:** Melleon Pharma B.V., 4817 ZH 7384 Breda, Nederländerna

**Marknadsförare:** Universitetets Apotek, PB 17, 00381 Helsingfors, www.ya.fi, 0300 20200.

YA

Utgåva 9-2015 03REF0928

CE 4488

STERILE IA