

# RFSU Raskaustesti



## RFSU RASKAUSTESTI

RFSU Raskaustestillä voit itse selvittää nopeasti ja helposti, oletko raskaana.

### Mitä raskauden yhteydessä tapahtuu?

Munasolun hedelmöityessä virtsaan erittyy hCG-hormonia (human Chorionic Gonadotropin eli koriongonadotropiini), ja sen määrä lisääntyy raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Raskaus voidaan todeta määrittelemällä hCG virtsasta. RFSU Raskaustestillä saat nopeasti ja helposti selville, oletko raskaana. Testin tulos on 99,9 % varma, ja se on samanlainen, mitä kätilöt ja gynekologit käyttävät. Testin voit tehdä siitä päivästä alkaen, jolloin kuukautisten olisi pitänyt alkaa, mihin alkaen päivästä tahansa, mutta varminta on tehdä mittaus aamuvirtsasta.

Mikäli olet raskaana, ota yhteyttä neuvolaan tai gynekologiin. Heiltä saat neuvoja.

Mikäli et ole raskaana, etkä halua tulla raskaaksi, käytä kondomia tai ota yhteyttä ehkäisyneuvolaan tai gynekologiin ehkäisyn järjestämiseksi.

### Tärkeää muistaa

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. RFSU Raskaustesti on tarkoitettu vain hCG-hormonin mittaamiseen virtsasta käyttöohjeen mukaisesti. Mikäli käyttöohjetta ei noudateta yksityiskohtaisesti, tulos voi olla virheellinen.
- Testi on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön, ja jokaista tikkua on tarkoitettu käyttää vain kerran.
- Älä käytä testiä viimeisen käyttöpäiväyksen jälkeen (viimeinen käyttöpäivä on pakkauksessa).
- Testi voidaan hävittää kotitalousjätteiden mukana.
- Tietty hCG-hormonia sisältävät lääkkeet saattavat antaa virheellisen tuloksen. Näin voi käydä myös joidenkin harvinaisten sairauksien yhteydessä, tai mikäli virtsassa on paljon bakteereita.
- Mikäli et ole varma tuloksesta, tai ellei tulos vastaa omia odotuksiasi, ota yhteys lääkäriin, neuvolaan tai gynekologiisi.

### Säilytys


Säilytä testiä ehjässä pakkauksessa jääkaapissa tai huoneenlämmössä. Testiä ei saa säilyttää alle +2 asteen tai yli +30 asteen lämpötilassa. Älä jätä pakkausta suoraan auringonvaloon, kosteuteen ja kuumuuteen. Pidettävä pois lasten ulottuvilta.

### Näin teet testin

Voit tehdä testin heti kuukautistesii oletetusta alkamispäivästä lähtien mihin aikaan päivästä vain mutta mittaus on varminta tehdä aamuvirtsasta, sillä silloin hCG-pitoisuus on korkeimmillaan.

### Tee näin

1. Kerää virtsa puhtaaseen ja kuivaan putkiloon. Pari cm riittää.
2. Anna avaamattoman testipakkauksen saavuttaa huonelämpötila (18-30°C, tähän menee vain pari minuuttia).
3. Varaa kello lähelle.
4. Avaa pakkaus merkkiiviivaa pitkin ja käytä testitikku mahdollisimman pian.
5. Pidä kiinni tikun värjäytystä osasta. Upota toinen pää alaspäin osoittavine nuolineen virtsaan. Älä upota sitä max-iviivaa syvemmälle. Nosta tikku pois 5 sekunnin kuluttua, ja aseta se puhtaalle ja kuivalle alustalle.
6. Odota 5 minuuttia ja anna tikun olla paikallaan. Tikussa näkyy yksi tai kaksi värillistä viivaa vaaleaa taustaa vasten värjätyn osan vieressä. Tulos on tarkastettava 30 minuutin kuluessa.

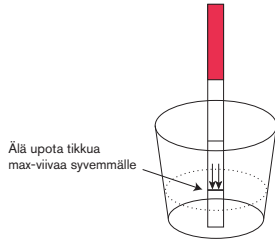

### Testituloksen tulkinta

#### Kaksi viivaa – olet raskaana


Mikäli tikussa näkyy kaksi värillistä viivaa, olet raskaana. Vaikka toinen viiva on hyvin heikko, se tarkoittaa, että olet raskaana. Jos et ole varma testituloksesta, tee testi uudelleen kahden päivän kuluttua, mieluiten ensimmäisestä aamuvirtsasta. Mikäli olet raskaana, ota yhteys lääkäriin, neuvolaan tai gynekologiin. Heiltä saat ohjeita.

#### Pelkkä kontrolliviiva – et ole raskaana

Mikäli tikussa näkyy vain yksi värillinen viiva, et ole raskaana. Mikäli kuukautisesi eivät siltikään ala, tee testi uudelleen 2 päivän kuluttua, mieluummin ensimmäisestä aamuvirtsasta. Mikäli tulos on edelleen sama, eivätkä kuukautisesi ole alkaneet, ota yhteys lääkäriin, neuvolaan tai gynekologiin.

#### Epäonnistunut testituloksesta

Mikäli viivoja ei ilmesty tai tulos on muutoin epäselvä, tee testi uudelleen ja noudata käyttöohjetta huolellisesti. Synny voi olla, että olet tehnyt testin virheellisesti tavalla. Mikäli asia ei korjaannu, ota yhteyttä RFSU:hun.

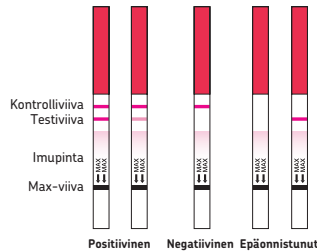

## KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

### Miten RFSU Raskaustesti toimii?

Kun tulet raskaaksi, kehosi alkaa tuottaa hCG-hormonia (human Chorionic Gonadotropin). Alkuraskauden aikana hCG-hormonin pitoisuus nousee. Testi pystyy tunnistamaan hormonin, ja sen voi tehdä jo samana päivänä, kun kuukautisten olisi pitänyt alkaa.

### Miten luotettava raskaustesti on?

RFSU Raskaustestin varmuus on yli 99,9 %. Tämä on samanlainen testi, jota gynekologit ja kätilöt käyttävät.

### Miten pian raskaustestin voi tehdä?

Voit tehdä raskaustestin jo samana päivänä, kun kuukautisten olisi pitänyt alkaa. Jos kuukautisesi ovat epä säännölliset, laske testin aloituspäivä viime kuukausien pisimmän kuukautiskierron mukaan.

### Vaikuttaako juoto nestemäärä tulokseen?

Hyvin suuri nestemäärä voi laimentaa virtsaa niin, ettei testi havaitse sen sisältämää hCG:tä. Pidä siksi juomasi nesteen määrä tavanomaisella tasolla. Virtsan hCG-pitoisuutta voi lisätä juomalla tavallista vähemmän ja pidättäytymällä virtsaamisesta pari tuntia ennen testin tekemistä. Testin voi tietenkin tehdä myös aamuvirtsasta.

### Vaikuttavatko lääkkeet tai sairaudet tulokseen?

Testitulokseen eivät vaikuta ehkäisytabletit, kipulääkkeet, antibiootit ja ne hormonivalmisteet, jotka eivät sisällä hCG:tä. Sen sijaan jotkut hCG:tä sisältävät lääkkeet saattavat aiheuttaa virheellisen testituloksen. Myös jotkut harvinaiset sairaudet sekä virtsan suuri bakteerimäärä saattaa vääristää tulosta. Ota yhteyttä äitiysneuvolaan tai gynekologiin, jos testituloksesi tuntuvat yllättävilä tai ristiriitaisilta.

### Entä jos yhtään viivaa ei tule näkyviin?

Jos testiliuskassa ei näy yhtään viivaa, tee uusi testi ja noudata tarkasti käyttöohjeita. Saattaa olla, että testin tekemisessä on sattunut virhe.

### Minkä värisiä viivat ovat?

Viivojen väri vaihtelee vaaleanpunaisesta tummanpunaiseen virtsan hCG-pitoisuudesta riippuen. Värisävy ei kuitenkaan vaikuta tulokseen.

### Miten kauan tulos on näkyvissä ennen kuin se haalenee tai muuttuu?

Positiivinen tulos jää yleensä pysyvästi näkyviin, mutta tausta voi tummetta. Tulos pitää aina tarkistaa 30 minuutin kuluessa.

### Mitä pitää tehdä, jos testi osoittaa minun olevan raskaana?

Ota yhteyttä äitiysneuvolaan tai gynekologiin ja varaa aika.

### Mitä pitää tehdä, jos testi osoittaa, etten ole raskaana?

Testituloksen varmuus on yli 99,9 %. Jos kuukautisesi eivät ole alkaneet 2 päivän kuluessa testin tekemisestä, tee uusi RFSU Raskaustesti. Jos tulos on jälleen negatiivinen eivätkä kuukautisesi ole vielä alkaneet, ota yhteys lääkäriin tai gynekologiin.

RFSU Raskaustesti on kehitetty yhteistyössä RFSU Klinikin kanssa. Lisätietoja tuotteesta löydät osoitteesta [www.rfsu.com](http://www.rfsu.com).

RFSU on voittoa tavoittelematon aatteellinen järjestö. Toimintamme tuottojen ylijäämää käytetään sukupuoli- ja parisuhdeasioihin liittyvään tiedottamiseen ja koulutukseen.

**Haluatko tietää lisää raskaudesta ja hedelmällisyydestä, tai onko sinulla kysymyksiä tuotteistamme? Lue lisää: [olenkoraskaana.fi](http://olenkoraskaana.fi)**

2015-11-27-03 16:01:00

CE  
0088  
082011-1