

TEHOKOSTEUTTAVAT SILMÄTIPAT

10 ml

YA Tehokosteuttavat silmätipat keskivaikeiden ja vaikeiden kuivasilmäisyyden oireiden lievittämiseen. Säilöntäaineettomat tehokosteuttavat silmätipat soveltuu hyvin myös herkkäsilmäisille ja piilolinssien käyttäjille. Trehaloosi ja hyaluronaani yhdessä kosteuttavat, voitelevat ja tasapainottavat kyynelkalvoa sekä suojaavat silmää kuivumiselta ja soluvaurioilta. Säännöllinen käyttö helpottaa erilaisten ympäristötekijöiden kuten kuivan ilman, tuulen, tupakansavun, ilmaansaasteiden, voimakkaan valon, näyttöpäätetyöskentelyn tai silmäleikkauksen sekä piilolinssien käytön aiheuttamia kuivasilmäisyyden oireita: kirvelyä, kutinaa ja roskan tunnetta silmässä. Oireita lievittävä vaikutus on pitkäkestoinen. YA Tehokosteuttavat silmätipat sopivat pitkäaikaiseen ja toistuvaan käyttöön. Suomessa kehitetty ja valmistettu lääkinällinen tuote. Avaamattoman pullon viimeinen käyttöpäivä: katso merkintä kotelon pohjassa sekä pullossa. Kostutustippapullo tulee käyttää kuuden (6) kuukauden kuluessa ensimmäisestä avaamisesta ja viimeiseen käyttöpäivään mennessä.

ANNOSTUS: 1-2 tippaa 1-3 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan molempiin silmiin.

KOOSTUMUS: 2,0% trehaloosi, 0,25% hyaluronaani sterilissä isotonisessa, vähäfosfaattisessa puskuriliuoksessa. Ei sisällä eläinperäisiä ainesosia.

KÄYTTÖOHJEET: Harjoittele pullon käsittelyä ennen ensimmäistä käyttöä. Purista pulloa ainoastaan annostelukärki alaspäin. Laita 1-2 tippaa silmiin 1-3 kertaa päivässä tarpeen mukaan. Poista korkin sinetti ensimmäistä kertaa pulloa avatessasi. Avaa korkki, kun olet laittamassa kostutustippoja ja laita korkki välittömästi takaisin pullon suulle kostutustippojen laiton jälkeen. Voit käyttää kostutustippoja myös piilolinssien käytön aikana.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET:

- Älä käytä tuotetta, jos olet yliherkkä jollekin sen aineosalle.
- Älä käytä tuotetta, jos pullo on vioittunut.
- Yhtä kostutustippapulloa tulee käyttää vain yksi käyttäjä.
- Älä kosketa avatun tippapullon kärjellä silmää tai piilolinssiä kontaminaatioiden välttämiseksi. Älä koskettele sormilla tippapullon kärkeä.
- Älä puristele pulloa korkin ollessa päällä.
- Käytä pullo kuuden (6) kuukauden kuluessa ensimmäisestä avaamisesta ja viimeiseen käyttöpäivään mennessä.
- Silmään laittamisen jälkeen tipat voivat aiheuttaa hetkellistä näön sameutta. Odota näön tarkentumista ennen kuin lähdet liikkeelle.
- Pidä vähintään 10-15 minuutin väli mahdollisen silmälääkkeen laittamisen kanssa.
- Säilytä 15-30 °C lämpötilassa, suojaa pullo jäätymiseltä ja auringonvalolta.
- Hävitä tyhjä pullo asianmukaisesti.
- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


 Finnsusp Oy, Pääskykalliontie 5, 21420 Lieto, Suomi

Markkinoija: Yliopiston Apteekki, PL 17, 00381 Helsinki. www.ya.fi.
Kehitetty ja valmistettu Suomessa.



 0537

STERILE A

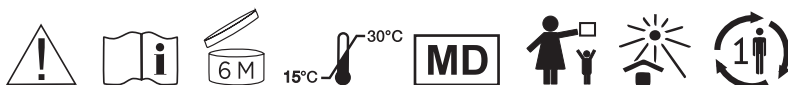

Tekstin viim.
päivitys 11/2020
11/2020 678-2

INTENSIVT FUKTANDE ÖGONDROPPAR

10 ml

YA Intensivt fuktande ögondroppar är en intensiv återfuktare som avser lindra och hjälpa måttligt eller svårt torra ögonsymptom. YA Intensivt fuktande ögondroppar är fri från konserveringsmedel och passar även känsliga ögon och användare av kontaktlinser. Trehalos och hyaluronans smörjande och fuktbindande egenskaper balanserar tillsammans tårvätskans naturliga sammansättning och skyddar ögat från att torka. Regelbunden användning av intensiv återfuktare lindrar symptom på torra ögon - klåda, sveda och känslan av främmande föremål i ögonen - som orsakas av miljöfaktorer, exempelvis torr luft, vind, rök, starkt ljus, datorarbete eller ögonkirurgi och användning av kontaktlinser. Symptomlindrande effekten är långvarig. YA Intensivt fuktande ögondroppar passar långvarig och frekvent användning. YA Intensivt fuktande ögondroppar är en medicinteknisk produkt som utvecklats och tillverkas i Finland. Sista användningsdag för oöppnad produkt: se märkning på botten av lådan samt på flaskan. Förbruka inom sex (6) månader efter öppningsdatum och före utgångsdatum.

DOSERING: 1-2 droppar 1-3 gånger om dagen eller vid behov i vardera ögat.

SAMMANSÄTTNING: 2,0 % trehalos, 0,25 % hyaluron i steril isotonisk, låg fosfat buffertlösning. Innehåller inget ämne med animaliskt ursprung.

BRUKSANVISNING: Öva hantering av flaskan innan den första appliceringen. Applicera 1-2 droppar 1-3 gånger dagligen eller vid behov. Ta bort korkens säkerhetsförslutning när du öppnar flaskan för första gången. Ta bort korken för applicering och tillslut flaskan strax efter applicering. Kläm flaskan endast med spetsen nedåt. Du kan använda återfuktande droppar även om du använder kontaktlinser.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Använd inte om du är allergisk mot något av innehållsämnen.
- Använd ej skadad flaska.
- Varje flaska skall användas av endast en användare.
- Vidrör inte ögat eller kontaktlinser med flaskans spets. Vidrör inte flaskans spets med fingrarna.
- Kläm inte på flaskan med korken på.
- Förbruka inom sex (6) månader efter öppningsdatum och före utgångsdatum.
- Mild tillfällig dimsyn kan upplevas strax efter applicering. Det är därför tillrådligt att undvik aktiviteter som kräver skarp syn under några sekunder tills synskärpan återkommit.
- Låt drygt 10-15 minuter passera mellan administrering av andra ögonpreparat.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Försvaras i 15-30 °C skyddad mot solljus och frysning.
- Kasta flaskan vederbörligt efter användning.


 Finnsusp Oy, Pääskykalliontie 5, 21420 Lieto, Finland

Marknadsförare: Universitetets Apotek, PB 17, 00381 Helsingfors. www.ya.fi. Utvecklad och tillverkad i Finland.



 0537

STERILE A

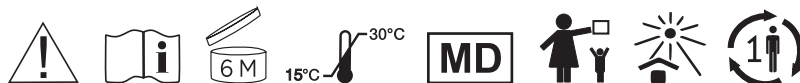

Senaste revidering 11/2020
11/2020 678-2