

Tutkimus on tarkoitettu kissojen ja koirien sisäloislääkityksen tarpeen arvioimiseksi, kun tavoitteena on välttää perusteettomia rutiininomaisia matolääkityksiä. Tutkimusta ei suositella sairaiden lemmikkien oireiden syyn selvittämiseen. Mikäli kissallanne/koirallanne on sisäloistartuntaan viittaavia oireita, eläinlääkärin tulisi arvioida tutkimusten ja hoitojen tarve. Rutiininomaista, ulostetutkimuksen tuloksesta riippumatonta loislääkitystä suositellaan pennuille, tiineille ja imettäville emoille, matkaille eläimille ja metsästäville/vapaana liikkuville eläimille.

Näytteenotto-ohjeet

- Näytteitä kerätään kaksi kappaletta eri ulostuskertoina.
- Näytteet kerätään näytepurkkeihin, joiden sisällä on formaliniin. **HUOM!** Lue ensin formaliniin koskevat turvallisuusohjeet sivun alaosasta.
- **Koira:** Kerää uloste esimerkiksi koirankakkapussiin. Uloste ei saisi päästä kosketukseen maaperän/mullan kanssa. Mahdolliset loiset säilyvät pussissa tunteja, joten pussin voi viedä kotiin ja ottaa näytteen siellä.
- **Kissa:** Kerää uloste hiekkalaatikosta mahdollisimman pian ulostamisen jälkeen. Vähäinen kissanhiekka-määrä ulosteen pinnalla ei häiritse analyysiä, mutta poista se mahdollisimman tarkasti.
- Kirjoita valkoiseen tarjalappuun eläimen nimi ja näytteenottopäivä ja liimaa tarra näytepurkkiin. Ota paketin mukana tulleella puulastalla noin ruokalusikallinen (kuva 1) ulostetta. Laita ulostenäyte putkeen (kuva 2) ja sekoita puulastalla huolellisesti (kuva 3). Hyvin sekoitetussa näytteessä ei ole suuria nokareita ja se on vellimäistä.
- **HUOM!** Jos havaitset ulosteessa matoja tai madon palasia, kerää ne/hiitä purkkiin mukaan.
- Sulje korkki huolellisesti.
- Laita purkki takaisin samaan muovipussiin. Sulje pussi. Näyte säilyy huoneenlämmössä. Pakkaa näytteet sekä täytetty lähete laatikkoon ja toimita Vitaan.



Näytteiden toimittaminen laboratorioon

Postitse

Kuljetuslaatikko on valmis lähetettäväksi maksikirjeenä postitse Vita Laboratorioon. Laatikossa on vastaanottajan osoite ja postimaksu on maksettu. Vie kuljetuslaatikko postilaatikkoon. Näytteet eivät saa jäätyä, joten pakkasella vie laatikko postin toimipisteeseen.

Itse tuomalla Vita Laboratorioon

Vita Laboratorio, Laivakatu 5 F, 00150 Helsinki
3. krs, vain hissillä
Näytteiden vastaanotto ma-to, klo 7:30 – 16:00

Näytteen kiinnittämällä käytetty formaliniini on haitallista!

Formaliinin joutuessa iholle riisu saastunut vaatetus ja pese iho runsaalla vedellä ja miedolla pesuliuksella sekä rasvaa iho. Formaliinin joutuessa silmiin huuhtelee silmät runsaalla vedellä 10–15 minuutin ajan ja mene välittömästi lääkärin. Formaliinin joutuessa suuhun juo runsaasti nestettä ja mene välittömästi lääkärin. Älä yritä oksentaa.