

Temparin Max on suunniteltu korjaamaan hammas aineella, joka koostuu hammaslääkärin käyttämistä ainesosista. Tämä on **tilapäinen apu**, jonka tarkoituksena on korvata irronnut paikka, kruunu tai täyte ennen kuin sinulla on mahdollisuus mennä hammaslääkäriin. Vain hammaslääkäri saa poistaa täyteaineen. **Mene hammaslääkäriin 48 tunnin kuluessa aineen käyttämisestä.**

**Varoitus:** Välttääksesi infektion ja/tai vakavan vamman, tätä tuotetta ei pidä käyttää jos sinulla on sykkivää kipua, haavaumia tai turvotusta kyseisellä alueella. Jos näitä oireita ilmenee, ota välittömästi yhteyttä hammaslääkäriin. Tätä tuotetta ei saa käyttää avohaavoille. **Älä käytä, jos olet allerginen eugenolille. LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ!** Pese ja kuivaa kätesi hyvin. Suojaa käyttämätön tuote kosteudelta. Käytä vain tarvittava määrä ainetta korjaukseen, ja säilytä loput myöhempää käyttöä varten. **PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.**

**Käyttöohje irronneen paikan korjaamiseen:** Pese kolon alue lämpimällä vedellä, mutta älä kuivaa. Leikkaa mukana tulevilla piikkityökälulla tai purista pieni määrä paikka-ainetta purkista, ja rullaa se palloksi sormiesi välissä. Täytä kolo hieman kolon reunojen yli paikka-aineella ja painele paikoilleen asetustyökälun kärjellä. Pure hampaasi yhteen ikään kuin purisit hampaita paperia vasten. Pureskele varovasti hampaitasi yhteen muutaman kerran, jotta saat miellyttävän purutuntuman. Poista ylimääräinen aine hampaan ympäriltä kostutetulla vanupuikolla. Kosteus nopeuttaa paikan kovettumista. Temparin Max jähmettyy muutamassa minuutissa, mutta vältä pureskelua 2 - 3 tunnin ajan korjauksesta, jotta materiaali kovettuu täysin.

**Käyttöohje irronneiden kruunujen tai täytteiden kiinnittämiseen:** Kokeile ensin, että saat sovitettua irronneen kruunun tai täyteen tarkasti hampaan pintaan. Jos tämä ei onnistu, niin älä jatka korjausta Temparin Maxilla. Jos kruunuun kiinnittyneenä on kiinnitysnasta tai jos kruunussa on hampaan pintaa, Temparin Max ei ehkä tartu kiinni. Huuhtelee varovasti hampaan alue ja kruunun tai täyteen sisäpuoli lämpimällä vedellä, mutta älä kuivaa. Kaavi pieni määrä Temparin Maxia purkista, pyöritä se sormien välissä palloksi ja aseta se tasaisesti kruunun tai täyteen sisälle. Aseta kruunu tai täyte hammasta vasten ja pure hampaat yhteen painaaksesi kruunu tai täyte paikoilleen. Temparin Max alkaa kovettua muutamassa minuutissa, mutta vältä pureskelua ainakin 2 - 3 tunnin ajan korjauksesta, jotta materiaali kovettuu täysin. Käytä hammasharjaa varovasti poistaaksesi ylimääräinen materiaali kruunun tai täyteen ympäriltä.

**Aineosat:** sinkkioksidijauhe, kalsiumsulfaatti, vaseliini, kaliumalumiinaatti, parafiini, alumiinisulfaatti, alumiiniumfosfaatti, mentolikiteet, eugenoli, keltainen rautaoksidi **Maahantuoja Narskuttelu Oy**, Teollisuustie 17, 82430 Puhos

Temparin Max är framtaget för tandlagning med hjälp av samma komponenter, som används av tandläkare. Temparin Max är ett **temporärt hjälpmedel** för att ersätta en fyllning, krona eller ett inlägg som lossnat, tills du har möjlighet att gå till tandläkaren. Medlet ska endast avlägsnas av tandläkaren. **Gå till tandläkaren inom 48 timmar från det du använt fyllningsmaterialen.**

**Varning:** För att undvika en infektion och/eller en allvarlig skada bör du inte använda produkten om du har en pulserande värk, sår eller svullnad i det berörda området. Om något av dessa besvär förekommer, rådgör omgående med din tandläkare om detta. Produkten får inte användas på öppna sår. **Använd inte produkten om du är allergisk mot eugenol. LÄS ALLA INSTRUKTIONER OMSORGSFULLT FÖRE ANVÄNDNINGEN!** Tvätta och torka händerna. Skydda den oanvända delen av produkten mot väta. Använd endast den mängd du behöver för tandlagningen och spara resten för senare bruk. **FÖRVARA PRODUKTEN OÅTKOMLIG FÖR BARN.**

**Hur du lagar en tandfyllning som lossnat:** Tvätta området kring hålrummet med varmt vatten men torka inte. Ta eller pressa ut en liten mängd fyllningsmaterial med hjälp av medföljande slev och rulla det till en boll mellan fingrarna. Fyll hålrummet rejält med fyllningsmaterialen och tryck det på plats med spetsen av applikatorn. Bit ihop tänderna försiktigt några gånger tills det känns bra. Använd en fuktad bomullspinne för att ta bort överblivet material kring tanden. Materialet härdar under påverkan av fukt. Temparin Max härdar inom fem minuter, men undvik att tugga i 2-3 timmar efter lagningen för att låta materialet härda fullständigt.

**Hur du fäster en krona eller ett inlägg som lossnat:** Prova först om det går att sätta tillbaka kronan eller inlägget på tandytan. Om det inte är möjligt, avbryt proceduren. Om kronan har ett stift eller om en bit av tanden sitter kvar inne i kronan, är det möjligt att Temparin Max inte fäster. Skölj tandområdet och kronan eller inlägget försiktigt med varmt vatten men torka inte. Ta en liten mängd Temparin Max ur burken, rulla den till en boll mellan fingrarna och sätt det jämnt in i kronan eller inlägget. Placera kronan eller inlägget på tanden och bit ihop för att få den på plats. Temparin Max börjar härda inom några minuter, men undvik att tugga i 2-3 timmar för att materialet ska härda fullständigt. Använd tandborsten försiktigt för att avlägsna överblivet material.

**Ingredienser:** Zinkoxidpulver, kalsiumsulfat, vaselin, kaliumaluminat, paraffin, alumiiniumsulfat, alumiiniumfosfat, mentolkristaller, eugenol, gul järnoxid. **Importör Narskuttelu Oy**, Teollisuustie 17, 82430 Puhos

**Valtuutettu edustaja/auktoriserad representant** Elara Pharmaservices Europe, 239 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolen, Dublin, D15 KV21, Ireland